



Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art.

## mikrocid® universal wipes premium

### Unser Plus

- gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets)
- schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- wirksam nach EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- dermatologisch getestet
- große hochwertige Tücher
- ohne Farb- und Parfümstoffe
- hervorragende Reinigungsleistung

### Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit, wie z. B.:

- Patientennahe Flächen
- Patientenbehandlungseinheiten
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte
- Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Smartphones und Tablets

### Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit                                                                                 | Konzentration   | Einwirkzeit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>bakterizid</b><br>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten<br>- hohe Belastung | gebrauchsfertig | 2 Min.      |
| <b>bakterizid</b><br>EN13727<br>- hohe Belastung                                            | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |
| <b>tuberkulozid</b><br>EN14348<br>- hohe Belastung                                          | gebrauchsfertig | 5 Min.      |

| Wirksamkeit                                                             | Konzentration   | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>levurozid</b><br>EN13624<br>- hohe Belastung                         | gebrauchsfertig | 1 Min.      |
| <b>levurozid</b><br>gemäß VAH<br>- hohe Belastung                       | gebrauchsfertig | 2 Min.      |
| <b>begrenzt viruzid</b><br>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie<br>- hohe Belastung | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |
| <b>begrenzt viruzid PLUS</b><br>EN14476<br>- hohe Belastung             | gebrauchsfertig | 15 Min.     |
| <b>Norovirus</b><br>EN14476<br>- hohe Belastung                         | gebrauchsfertig | 60 Sek.     |
| <b>Norovirus</b><br>EN14476<br>- geringe Belastung                      | gebrauchsfertig | 30 Sek.     |
| <b>Polyoma SV40</b><br>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie<br>- hohe Belastung     | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |
| <b>Rotavirus</b><br>EN14476<br>- geringe Belastung                      | gebrauchsfertig | 15 Sek.     |

### Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

Ein Softpack enthält 100 gebrauchsfertig getränkte Tücher.  
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)  
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr.648/2004: < 5% anionische Tenside

### Chemisch-physikalische Daten

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Dichte                | ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup>         |
| Farbe                 | farblos                            |
| Flammpunkt            | 26 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 |
| Form                  | flüssig                            |
| pH                    | 3 - 3,6                            |
| Viskosität, dynamisch | Keine Daten verfügbar              |

## Besondere Hinweise

### Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist äußerst materialverträglich mit Metallen und Kunststoffen. Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel "Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst". Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich.

Folgende Größen sind erhältlich:

- mikrocid® universal wipes *premium* (6 x 100 Tücher 20 x 20 cm) Reichweite\*: ca. 1,0 m<sup>2</sup>
- mikrocid® universal wipes *premium maxi* (6 x 80 Tücher 25 x 25 cm) Reichweite\*: ca. 1,5 m<sup>2</sup>

### Anwendungshinweise

Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Achten Sie beim Öffnen des Softpacks auf hygienische Aspekte. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 1 Monat. Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

## Bestellinformation

| Artikel                                            | Lieferform | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------|------------|----------|
| mikrocid® universal wipes premium (100 Tücher)     | 6/Karton   | 70000038 |
| mikrocid® universal wipes premium maxi (80 Tücher) | 6/Karton   | 70001061 |

## Verwandte Produkte

- mikrocid® AF wipes
- mikrocid® PAA wipes
- mikrocid® sensitive wipes
- mikrocid® universal liquid

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\* Die Reichweite pro Tuch ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Oberflächenstruktur der gewischten Fläche.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)