

# Sitty® Basic Lumbalkissen

Dieses Lumbalkissen hilft der Wirbelsäule die natürliche Wölbung beizubehalten. Es ist mittels Klettband sowohl zur Quer- als auch Längsbefestigung erhältlich. Beide Ausführungen sind auch zur Unterstützung des LWS-Bereiches im Liegen geeignet.

## Indikationen

- Muskelverspannungen
  - Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule
- Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Anwendungshinweise

Das Lumbalkissen mit dem Klett- bzw. Querbefestigungsband an der Rückenlehne eines Stuhles befestigen. Das Kissen ist dann korrekt positioniert, wenn die abflachende Seite nach oben zeigt.

Je nach Bedarf kann die genaue Position an der Rückenlehne korrigiert werden.

## Materialien

- Innenkern: Schaumstoff
- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Der Innenkern ist nicht waschbar!
- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!**  
**Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**

Art./REF	Breite x Tiefe x Höhe
20020	40 x 28 x 5 : 1 cm mit Querbefestigungsband
20021	33 x 28 x 5 : 1 cm mit Klettband längs

