

Kältespray



UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Eigenschaften

- Austrittstemperatur < -40°C
- Verdampft sofort und rückstandsfrei
- Geruchneutral oder in angenehmen Geruchsvarianten
- Präzises Aufsprühen durch Applikationsröhrchen
- Sparsam durch Spezialventil
- als Medizinprodukt der Klasse I zugelassen

Präparate-Typ

Aerosol zur extraoralen Anwendung.

Anwendungsbereiche

Kältespray eignet sich zum schnellen Vereisen von Schaumstoffpellets, zur Vitalitätsprüfung von Zähnen im Dentalbereich und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien wie z. B. Hydrokolloid etc.

Anwendung

Den zu kühlenden Gegenstand aus einer Entfernung von ca. 2-3cm für 1-2sec. einsprühen. Nicht direkt im Mund anwenden, Vereisungsgefahr! Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Sicherheitshinweise

H 222 - H 229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Duft

Artikelnummer

- | | |
|-----------|------|
| • Classic | 9500 |
| • Mint | 9800 |
| • Orange | 9700 |

Gutachten

Unsere Produkte sind nach den neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage Kopien unserer Gutachten zu.

Ergänzende Information

Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns über unsere Email: unigloves@unigloves.de oder telefonisch unter 02241 - 9323 - 0 erreichen.

Hersteller: PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch



Gefahr