


ReadyWrap®

Messpunkte des Beins & Artikel-Übersicht.

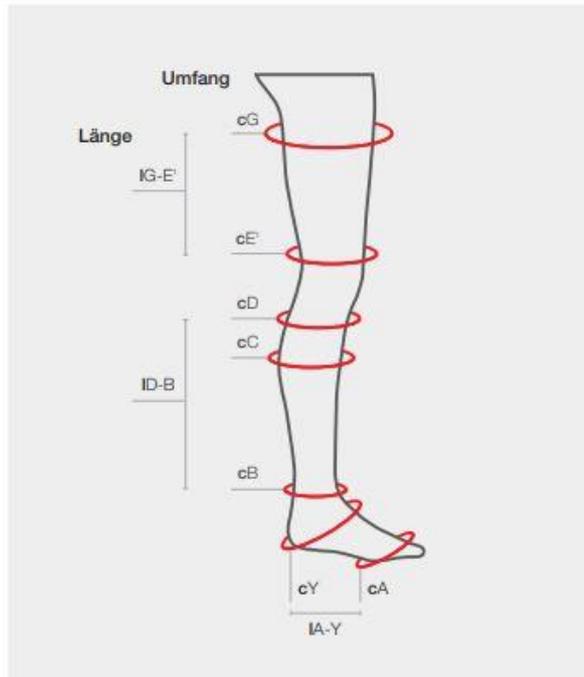

Bitte Sie den Patienten, wenn möglich zu stehen.
Markieren und messen Sie das Bein wie folgt:

Umfangs-Messpunkte:

- cA zwischen Fußballen und Zehenansatz (Zehengrundgelenk)
- cY über Ferse und Rist bei maximaler Dorsaflexion
- cB oberhalb des Knöchels (ca. 2 cm über dem Malleolus lateralis)
- cC am größten Umfang der Wade
- cD an der engsten Stelle unter dem Knie, ca. 2–3 cm unter der Kniekehle
- cE' 5 cm über dem Knie
- cG ca. 5 cm unterhalb des Schrittes

Längenmaße:

- IA-Y vom Fersenrücken bis zum Ansatz der kleinen Zehe
- ID-B Länge von Messpunkt cB bis Messpunkt cD
- IG-E' Länge von Messpunkt cE' bis Messpunkt cG

Anmerkung:

c = Umfang, l = Länge

Alle Längenmessungen sollten senkrecht ausgeführt werden und der Körperkontur folgen. Alle Maßangaben in Zentimetern.