ACHTUNG:

- DIESES PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN!
- VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM ELEKTRO-BACKOFEN, PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN
- DEN INHALT NICHT VERZEHREN
- DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN
- NUR FÜR DIE ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN GEEIGNET
- NUR UNTER STRENGER AUFSICHT ERWACHSENER VERWENDEN

BITTE DIESE GEBRAUCHSHINWEISE GUT DURCHLESEN!

Erwärmung in der Mikrowelle oder im Elektro-Backofen: Papier-Etikett vom Produkt entfernen und für den späteren Gebrauch aufbewahren. Nehmen Sie das Innenkissen aus der Produkthülle und erwärmen Sie nur dieses! Das saubere und trockene Produkt für maximal 30 Sekunden bei maximal 800 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Sicherstellen, dass sich der Drehteller frei drehen kann, sauber bzw. frei von Fettrückständen ist und sich die Mikrowelle nach maximal 30 Sekunden automatisch ausschaltet. Die Grillfunktion ausschalten! Für die Erwärmung in einem vorgeheizten Elektro-Backofen (Achtung: nur bei Umluft!) legen Sie das Produkt für maximal 6 Minuten bei 100 °C auf einem hitzebeständigen Teller auf die mittlere Ofenschiene. Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Das Produkt vor jeder Erwärmung stets auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Wärmeentwicklung zwischendurch kontrollieren. Bei den ersten Erwärmungen des Produkts kann es an der Produkt-Oberfläche zu einer geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich jedoch nach mehrmaliger Nutzung einstellt.

Produkt niemals überhitzen! Erwärmung des Produkts grundsätzlich nur unter Aufsicht Erwachsener vornehmen. Vorsicht beim Herausnehmen des Produkts aus der Mikrowelle oder aus dem Ofen. Beachten Sie die angegebene Erwärmungszeit und Wattzahl. **Achtung:** Direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen führen. Stellen Sie durch sorgfältiges Durchkneten immer sicher – besonders bevor das Produkt einem Kind gegeben wird – dass das Produkt nicht zu heiß ist, und dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist. **Achtung:** Die Oberflächentemperatur kann auch nach der eigentlichen Erwärmung nach der Entnahme aus der Mikrowelle noch weiter steigen. Vor Gebrauch die Temperatur des Produkts (max. 41 °C) an einer empfindlichen Körperstelle (z. B. in der Armbeuge) überprüfen. **Achtung:** Vor erneuter Erwärmung muss das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt und die Oberfläche sauber und trocken sein. Es kann bis zu maximal 4 Stunden dauern, bis das Produkt komplett auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Fremdkörper oder Verunreinigungen (z. B. Speisereste) können das Produkt beschädigen. Bei Mikrowellen mit einer Leistung von 850-1000 Watt darf die Erwärmungsdauer 20 Sekunden nicht überschreiten. Bei einer höheren Leistung als 1000 Watt darf dieses Produkt NICHT erwärmt werden. Wenn versehentlich überhitzt, Produkt an einem sicheren Ort vollständig bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen und so lange nicht berühren.

Pflegehinweise: Die Produkt-Füllung enthält naturreine, behandelte Hirsekörner und getrockneten Lavendel. Das Produkt kann beliebig oft erwärmt werden ohne seine Wärmewirkung zu verlieren. Bitte behandeln Sie dieses Produkt von Warmies® mit Sorgfalt, um eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die Produktoberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen und vor dem Gebrauch an der Luft trocknen lassen. Das Produkt nicht in Wasser eintauchen. Das Produkt nach jeder Verwendung stets kühl und trocken aufbewahren. Den Zustand des Produkts in regelmäßigen Abständen überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung im normalen Hausmüll entsorgen. Für eine intensivere Reinigung das herausnehmbare Körnerkissen entnehmen und die Produkt-Hülle separat bei 30 °C von Hand waschen. Das Produkt könnte abfärben. Eine separate Reinigung der Füllung bzw. des Innenkissens ist nicht möglich. Reinigen Sie das Produkt nur gemäß diesen Herstellerangaben. Bevor das Produkt erneut erwärmt werden kann, muss es wieder vollständig trocken sein.