

Clap Tzu



Modell: HAVANNA mit Kopfteil 40°/90°

Bedienungsanleitung


Clap Tzu



Hebel für die Auslösung der Gasdruckfeder. Hiermit wird das Kopfteil positiv/ negativ verstellt

Der Hanning-Motor, Herzstück der Höhenverstellung. Er wird pneumatisch über das mitgelieferte Fußpedal angesteuert.

Die elegant versteckten Rollen. Nutzen Sie sie auch um die Liege zu bewegen, wenn Sie sie verschieben möchten.

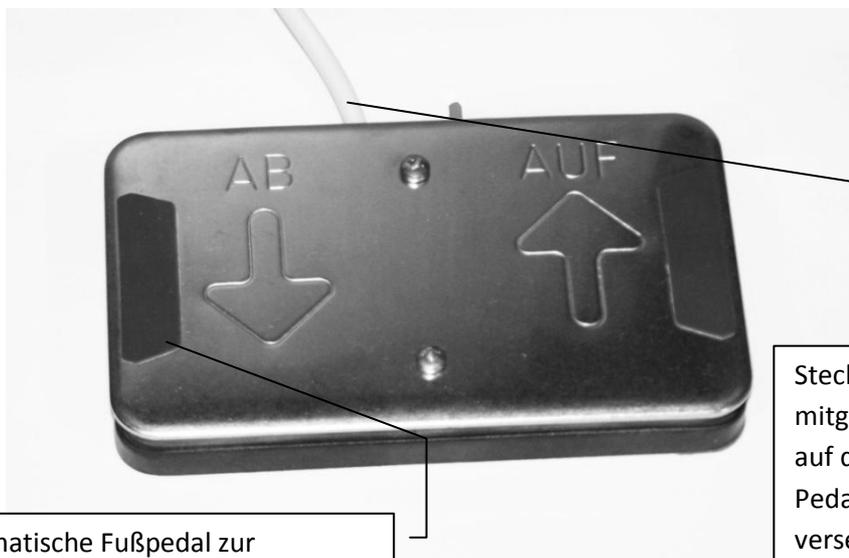


Das pneumatische Fußpedal zur Ansteuerung des Hanning-Elektromotors.

Stecken Sie den mitgelieferten Luftschlauch auf den linken Stutzen des Pedals. (sollten Sie versehentlich den rechten benutzt haben, funktioniert das Pedal andersherum)


Clap Tzu

Um das Kopfteil der Massageliege HAVANNA zu verstellen, greifen Sie von aussen mit der Hand unter den Rand, wo sich der Bügelgriff des Auslösehebels befindet. Ziehen Sie den Griff unter das Kopfteil und es wird ohne Belastung nach oben kommen. Drücken Sie während der Auslösung nach unten, verstellen Sie das Kopfteil negativ. Die Verstellung erfolgt stufenlos, was bedeutet, dass der Punkt an dem Sie den Hebel loslassen der Endpunkt ist.

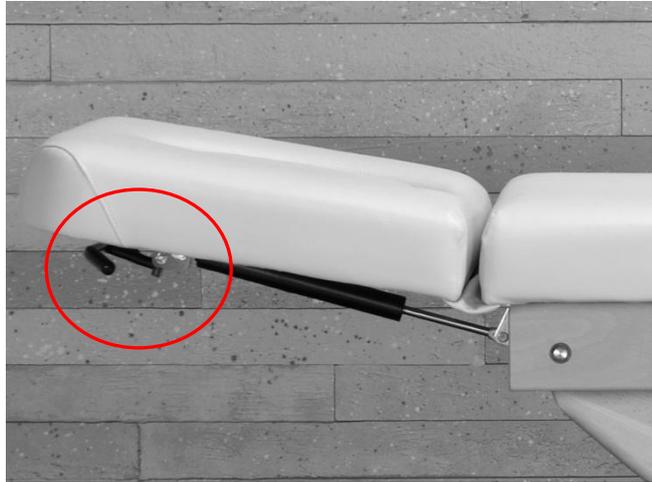

Das Kopfteil dient nur zur Lagerung des Kopfes und darf nicht zum Aufsitzen genutzt werden, da ansonsten die Gasdruckfeder und selbst die Liegefläche Schaden nehmen würde!

Der Hanning-Elektromotor ist an der feststehenden Seite der Liege montiert. Stecken Sie den Luftschlauch zur Ansteuerung des Motors auf den messingfarbenen Stutzen (s.Bild). Das andere Ende des Schlauches stecken Sie in den (von oben betrachtet) linken Stutzen des pneumatischen Fußpedals.

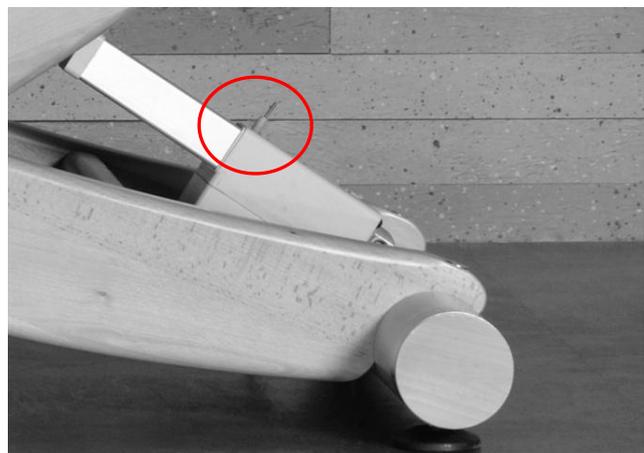

Stellen Sie sicher, dass weder das Netzkabel des Motors, noch der Luftschlauch in dem Aktionsbereich der der Rollen liegen. Ein Überfahren führt entweder zum Totalausfall (Netzkabel) oder zu Verlust der Höhenkontrolle (abgeknickter Schlauch).

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Die Liegefläche ist mit gebräuchlichen Flächendesinfektionmitteln zu reinigen, wobei darauf zu achten ist, dass das verwendete Mittel einen **Alkoholanteil von höchstens 30%** aufweist.

Wir empfehlen die Verwendung von Schülke Mikrozyd AF Liquid zur Sprühdesinfektion oder BODE (Hartmanngruppe) Bacillol in Kombination mit BODE X-Wipes zur Wischdesinfektion.

Datenblatt

HAVANNA Kopfteil 40/90° mit Gesichtsausschnitt

Ausführung

- Zweiteilige Liegefläche mit 40° positiv und 90° negativ verstellbarem Kopfteil mit Gesichtsausschnitt
- Länge Kopfteil 45 cm, stufenlose Verstellung mittels Gasdruckfeder mit Handtaster
- Bezug: ölbeständiges PU-Leder
- Polsterung: 70 mm
- Holzart: Buche massiv
- Gestellfarbe:
Palisander gebeizt oder Buche natur
- Elektrische Höhenverstellung mit Druckluftfußpedal.

Optionen

- Beheizbare Liegefläche mit 3 Heizzonen
- Zusätzlicher Fußschalter zur Höhenverstellung

Dimension

- Aufstellmaß Untergestell: 73 x 150 cm, Liegefläche: 202 x 70/75/80/85 cm
- Gewicht: 100 kg
- Arbeitshöhe: 58-95 cm
- Maximales Arbeitsgewicht: 185 kg

Service

- Garantie: 24 Monate

Motor

Netzspannung:	1~ 100 / 115 / 230 V AC ± 10 %
Netzfrequenz:	50 - 60 Hz
Hub:	bis 300 mm
Max. Verstellkraft:	8000 N
Verstellgeschwindigkeit:	3 - 18 mm/s