

Instru Zym Bio-wipes

Produktinformation

Produktbeschreibung

Instru Zym Bio-wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Das CO₂-neutrale Tuchmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen ist 100 % biologisch abbaubar.

Anwendungsgebiet

Instru Zym Bio-wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym Bio-wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym Bio-wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden. Nur für den professionellen Gebrauch.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
600897	80 Tücher	20 x 20 cm	Flowpack	6 x 80 Tücher	18313455	4260181253718	4260181251431



DrDeppe

Instru Zym Bio-wipes

Produktinformation

Medizinproduktklasse

I

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside,
Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

24 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder-
verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand
an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es
gegen unbefugten Zugriff.

Informationen

zu diesem Produkt



Weiterführende Infor-
mationen finden Sie
auf unserer Homepage
www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen
richten Sie bitte an
info@drdeppe.de



DrDeppe

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen

T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de