

THERMO ALKA CLEAR



Spezialklarspüler
für thermische
Steckbeckenautomaten



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm

THERMO ALKA CLEAR ist geeignet zur alkalischen thermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, reduziert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist extrem schaumarm eingestellt.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

THERMO ALKA CLEAR ist zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller geeignet. THERMO ALKA CLEAR reduziert die Verkalkung von Steckbeckenspülen.

Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Flächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMO ALKA CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen. Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-alkalibeständige Steckbeckenspülen geeignet.

Dosierung

0,1 - 0,45 % (bzw. 1 - 4,5 ml/L), je nach Automatentyp und Wasserhärte (siehe Herstellerangaben). Zudosierung erst ab 30 °C. Dosierung durch Fachpersonal durchführen.

Zusammensetzung

15 - 30 % Polyacrylat.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Aluminium, Kupfer, Messing, Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM). Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Acrylonitril-butadienestyren (ABS). THERMO ALKA CLEAR ist zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken der Firma Horcher, Arjo, ZK Hospital sowie Kodra geeignet.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
THERMO ALKA CLEAR	Kanister	3	4,25 L	00-137-050	16202355
Zubehör	Kanisterschlüssel	1		00-909-050	

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

