




**convatec**

— forever caring —



# Genau auf meinen Alltag zugeschnitten

Wundversorgung kann so einfach sein

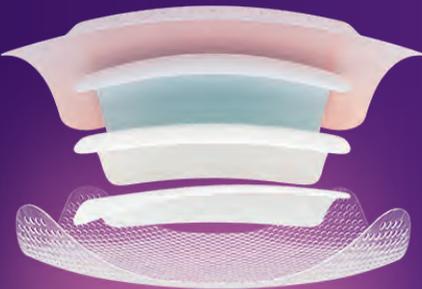

Der neue, überlegene  
Schaumverband\*<sup>1</sup>

Neu

**ConvaFoam**<sup>®</sup>

# Was sind für Sie die wichtigsten Anforderungen an einen Schaumverband?<sup>4</sup>

Wir von Convatec haben medizinische Fachkräfte befragt und zugehört, Innovationen vorangetrieben und weiterentwickelt, um eine bessere Wundversorgung zu ermöglichen:

1



## Absorption

Optimierte Absorption, Retention und besseres Flüssigkeitsmanagement für ein überlegenes Exsudatmanagement<sup>\*1</sup>.

2



## Haftung

Verbesserte hautfreundliche Haftung, die die Tragedauer maximiert.<sup>1,2</sup>

3



## Einfaches Entfernen

Ein auf ein Minimum reduzierter Schmerz bei Entfernung des Verbands erhöht den Patientenkomfort.<sup>5</sup>

4



## Längere Tragedauer

Eine Tragedauer über 7 Tage<sup>6</sup> reduziert die Anzahl der Verbandwechsel und schont dabei die Ressourcen in der Versorgung.<sup>3</sup>



# ConvaFoam®: Genau auf Ihren Alltag zugeschnitten



## Exsudatmanagement

Optimierte Absorption, Retention und Überlegenes Flüssigkeitsmanagement\*<sup>1</sup>



## Starke, hautfreundliche Haftung

Überlegene Haftung bei gleichzeitig sanfter, atraumatischer Entfernung\*<sup>1,2</sup>



## Hautschutz

Vertikale Aufnahme reduziert die Mazeration der wundumgebenden Haut<sup>3</sup>



## Patientenkomfort

Entwickelt, um Schmerzen beim Entfernen zu minimieren<sup>5</sup>



## Lange Tragedauer

Eine Tragedauer von 7 Tagen bedeutet weniger Verbandwechsel – das spart Zeit und Ressourcen<sup>1</sup>



## Effizienz

Kann bei der Anwendung zugeschnitten und neu positioniert werden, was dazu beiträgt, Abfall zu reduzieren<sup>2,6</sup>



## Vielseitigkeit

Eignung für eine Vielzahl von Wundtypen – von weniger bis zu sehr komplexen Wunden<sup>7</sup>



# FALLSTUDIE | Diabetischer Fußulkus

## 1. Über den Patienten

- 72-jähriger Mann
- Diabetiker, Hypertoniker, Träger eines Herzschrittmachers

## 2. Über die Wunde

- Verletzung beim Schneiden der Zehennägel
- Die Stelle ist wund und rot, keine Schmerzen
- Selbst vom Patienten mit Gaze versorgt
- Stark infizierter, stark mazerierter Wundrand
- Aufgrund der Lokalisation und der Exsudatmenge schwierig zu versorgen

## 3. Behandlung

- **Aquacel® Ag Extra** als Primärverband und **ConvaFoam® Border** als Sekundärverband für die ersten 10 Behandlungstage
- **ConvaFoam® Border** als Primärauflage bis zur vollständigen Epithelisierung

## 4. Ergebnisse

- **Tag 8** Wundrand zeigte eine reduzierte Mazeration nach 7-tägigem Exsudatmanagement
- **Tag 20** Wunde zu 90 % geheilt
- Entlassung nach 1 Monat mit Anleitung zum selbstständigen Verbandwechsel
- Patienten-Adhärenz sehr hoch
- Insgesamt wurden 5 Verbände verwendet

## 5. Was Ärzte sagen

- **ConvaFoam®** konnte einfach auf die Zehen des Patienten zugeschnitten werden
- Silikonschicht haftet sehr gut
- Der Verband blieb während der Tragedauer an Ort und Stelle

### Übersicht über den Heilungsverlauf



Tag 0



Tag 8



Tag 20



Entlassung nach  
4 Behandlungswochen

# Der neue ConvaFoam®

Der einzige Schaumverband, der unsere drei Technologien vereint: Aquacel® Hydrofiber®, Superabsorber-Fasern und ConvaTac™ Silikon. Überlegenes\*<sup>1</sup> Exsudatmanagement mit hautfreundlicher Haftung<sup>2</sup> für eine längere Tragedauer\*<sup>1</sup> und eine effizientere<sup>3</sup> Wundversorgung.

## Schicht für Schicht auf Ihren Alltag zugeschnitten



Mehr  
dazu  
hier:





## ConvaFoam® Silicone



	Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
	8 x 8 (5 x 5) cm	10 Stück	423 252	172 564 94
	10 x 10 (6,5 x 6,5) cm	10 Stück	423 253	172 565 02
	15 x 15 (10 x 10) cm	5 Stück	423 908	189 000 52
Multisite	14 x 19,8 (8,7 x 14) cm	5 Stück	423 530	189 000 46
Sakral (klein)	16,5 x 20 (11,4 x 13,5) cm	5 Stück	423 257	172 565 48
Sakral (groß)	21 x 24 (13,8 x 16,4) cm	5 Stück	423 256	172 565 31

## ConvaFoam® Border



	Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
	8 x 8 (5 x 5) cm	10 Stück	423 258	172 562 35
	10 x 10 (6,5 x 6,5) cm	10 Stück	423 259	172 562 41
	12,5 x 12,5 (8 x 8) cm	10 Stück	423 260	172 562 58
	17,5 x 17,5 (13 x 13) cm	5 Stück	423 916	189 000 69
	21 x 21 (15 x 15) cm	5 Stück	423 275	172 563 82
	8 x 13 (4 x 9) cm	5 Stück	423 917	189 000 81
	10 x 20 (6 x 15) cm	5 Stück	423 277	172 564 36
	10 x 25 (6 x 20) cm	5 Stück	423 918	172 564 59
	10 x 30 (6 x 25) cm	5 Stück	423 919	172 564 71
Multisite	14 x 19,8 (8,7 x 14) cm	5 Stück	423 267	189 000 75
Sakral	16,5 x 20 (11,4 x 13,5) cm	5 Stück	423 272	172 563 47
Sakral	21 x 24 (13,8 x 16,4) cm	5 Stück	423 270	172 563 24

## ConvaFoam® nicht-adhäsiv



	Größe (Wundkissen)	Packungsinhalt	REF	Original PZN
	5 x 5 cm	10 Stück	423 354	172 565 54
	10 x 10 cm	10 Stück	423 355	172 565 60
	15 x 15 cm	5 Stück	423 357	172 565 77
	10 x 20 cm	5 Stück	423 362	172 566 20
	15 x 20 cm	5 Stück	423 363	172 566 08
	20 x 20 cm	5 Stück	423 360	172 566 66

### Bestellungen:

Telefon: 0800 - 162 43 81  
de.kundenservice@convatec.com

### Kundenberatung:

anfrage@convatec.com

\* Gegenüber ausgewählten Verbänden, die in-vitro auf Absorption, Retention, Flüssigkeitsaufnahme und Haftung getestet wurden.

1. WHRI9478 MS186\_DHF1093 ConvaFoam Superiority Report Testing between May 2021 – June 2022.
2. WHRI8050 MS172 Adhesion Characteristics of ConvaFoam.
3. Wounds UK Best Practice Statement. Effective exudate management. London: Wounds UK, 2013. Available to download from: [www.wounds-uk.com](http://www.wounds-uk.com).
4. Kantar, Health Division 1st March 2021 Ref: 260415119.
5. Soft Silicone Dressings Made Easy. Meuteneire F, Rucknagel H, Wounds International, May 2013.
6. WHRI8051 MS173 In-vitro Performance Characteristics of ConvaFoam.
7. ConvaFoam Silicone IFU.

Neu

**ConvaFoam®**