



Gering alkoholische Lösung zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

mikroqid® universal p liquid

Unser Plus

- Schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie einige unbehüllte Viren
- Norowirksam ab 30 Sekunden
- Begrenzt viruzid PLUS in 5 Minuten – gemäß den Anforderungen der EN 14885 für patientennahe Flächen
- Nach den neuesten Standards mikrobiologisch getestet – unter praxisnahen Bedingungen bei hoher Belastung
- Hohe Materialverträglichkeit selbst bei sensiblen Oberflächen wie Mobiltelefone und Displays
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und auch ohne Handschuhe anwendbar*

Anwendungsgebiete

Das Produkt eignet sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art inklusive der Patientenumgebung. Die gebrauchsfertigen und vielseitig einsetzbare Lösung ist speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt: Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel werden materialschonend und verlässlich wirksam desinfiziert.

Anwendungshinweise

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

- Sprayanwendung: Flächen aus einem Abstand von mindestens 30 cm besprühen (ca. 40 ml/m²) und mit einem Tuch verwischen und einwirken lassen.
- Anwendung mit Schraubverschluss: Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen.

Auf vollständige Benetzung achten. Nach Gebrauch auf ein Verschließen der Flasche achten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727; EN 16615; VAH	1 Min.**
levurozid	EN 13624; EN 16615; VAH	1 Min.**
mykobakterizid	EN 14348	5 Min.**
tuberkulozid	EN 14348	5 Min.**
Viren		
Norovirus	EN 14476; EN 16615 (mod.)	30 Sek.** 1 Min.**
begrenzt viruzid	EN 14476; EN 16615 (mod.)	1 Min.**
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476; EN 16615 (mod.)	5 Min.**

** hohe Belastung



Das Produkt befindet sich im Verfahren zur VAH-Zertifizierung und zur Aufnahme in die VAH-Liste

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

mikrozid® universal p liquid

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
22,5 g Propan-2-ol, 2,5 g Propan-1-ol, 1,54 g Glykolsäure

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

< 5 % anionische Tenside

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen inklusive Acrylglas (PMMA-GS). Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen. Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel „Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen“. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde ist der Verpackung zu entnehmen.

Folgende Größen sind erhältlich:

- mikrozid® universal p liquid 1 l Sprühflasche
- mikrozid® universal p liquid 1 l Flasche
- mikrozid® universal p liquid 5 l Kanister

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können unter der EAK 07 06 01 entsorgt werden. Die Eignung des Wirkspektrums ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich zu prüfen. Nicht geeignet zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Keine direkte Behandlung von Lebens- und Futtermitteln. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

BAuA-Nr.: N-117826



Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
mikrozid® universal p liquid 1 l Flasche	10 / Karton	4032651986118	19990117	70003757
mikrozid® universal p liquid 5 l Kanister	1 Kanister	4032651986156	19990146	70003759
mikrozid® universal p liquid 1 l Sprühflasche	10 / Karton	4032651986132	19990123	70003758

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135502
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Umfülltrichter 1	17901
Wandhalterung Kunststoff 1 l Vierkantflasche	134416
Wandset für 1 l Flaschen	70003114
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101

Verwandte Produkte

- mikrozid® universal p wipes *free line*
- mikrozid® universal p wipes *premium*
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® AF liquid
- mikrozid® PAA+ wipes


Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie demnächst im Internet unter www.schuelke.com

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

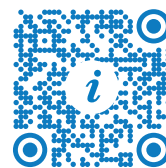

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Deutschland
+49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.