

Digital Thermometer



1252



Dieses elektronische Digitalthermometer misst die Körpertemperatur schnell und genau. Für Kleinkinder nicht geeignet. Die gemessene Temperatur ist leicht ablesbar und wird angezeigt bis sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten automatisch abschaltet. Ein kurzer Ton signalisiert die Betriebsbereitschaft und das Ende der Messung. Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Das Thermometer ist wasserdicht und frei von Quecksilber.

Das Thermometer ist nach Standard EN 12470-3 Clinical Thermometers – Part 3 hergestellt.

Messbereich: 32°C bis 42°C

Messgenauigkeit: $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$

Anzeige: Flüssigkeitskristall-Anzeige (LCD)

Batterie: 1,5 V Knopfzellenbatterie (LR/SR-41)

Abmessungen: ca. 129 x 22 x 14 mm (mit transparenter Box)

Bedienungsanleitung:

1. Vor der Benutzung mit Wischdesinfektion reinigen.
2. An-/Ausschalter auf dem Thermometer betätigen (nicht mit dem Fingernagel).
3. Signal ertönt.
4. Die zuletzt gemessene Temperatur wird angezeigt.
5. Gemessen werden kann oral (in der Mundhöhle), rektal (im After) oder unter dem Arm.
6. Die Messung ist beendet, wenn das Signal ertönt.
7. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten. Ansonsten erfolgt eine automatische Abschaltung nach ca. 10 Minuten.

Das Thermometer dient ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur und sollte Kindern nicht unbeaufsichtigt überlassen werden (Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen). Thermometer nicht biegen und vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Nicht mit Chemikalien in Verbindung bringen. Keine aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Nur zum Wechseln der Batterie öffnen.