

Typ I

MediWipes Typ I - Vliestuchrolle

30 - 140 Blatt

Materialien:

- PET (MediWipes „premium“, „eco“, „basic“)
- PP (MediWipes „pro“)
- Mischgewebe (MediWipes „plus“)

Tuchgröße

- 15 x 30 cm
- 30 x 30 cm
- 30 x 32 cm
- 20 x 36 cm



Typ II

MediWipes Typ II

wie MediWipes Typ I

+ WHR Reinigungstuch

+ WHR Desinfektionstuch

Mit den **MediWipes Typ II** wird eine sichere und einwandfreie Aufbereitung sichergestellt



Typ III

MediWipes Typ III

wie MediWipes Typ II

+ Folienbeutel und Befestigungsring

+ Timestrip Zeitidentikator für 1 Monat

MediWipes Typ III bieten das Komplettpaket hinsichtlich Kontrolle und Risikominimierung bei der Verwendung von Tuchspendersystemen im Vortranksystem



How to use



1

Geben Sie die Rolle in den Folienbeutel und setzen Sie diesen in den Spendereimer ein



2

Ziehen Sie das erste Tuch aus der Rollenmitte ein Stück heraus und geben Sie die Desinfektionslösung hinzu



3

Umfassen Sie den Folienbeutel und das herausgezogene Tuch und führen Sie es durch die Feuchttuchentnahme



4

Verschließen Sie den Deckel und befestigen Sie die Folie mit dem Gummi an der Feuchttuchentnahme



5

Verwerfen Sie das erste Tuch und schließen Sie die Feuchttuchentnahme, damit die Tücher nicht austrocknen



6

Lösen Sie den Timestrip aus und kleben Sie ihn auf den Deckel. Beachten Sie die maximale Standzeit von 28 Tagen