schülke -}

Alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten

thermosept® alka clean forte

Unser Plus

- starke Reinigungsleistung zur Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung von CJK/vCJK (gem. RKI-Mitteilung)
- materialschonend auch gegenüber empfindlichen Materialien wie eloxiertem Aluminium
- breiter Anwendungsbereich
- gute Benetzung und Proteinablösung durch Tensidzusatz

Anwendungsgebiete

thermosept® alka clean forte ist universell einsatzbar, insbesondere geeignet für die Aufbereitung von chirurgischen, mikrochirurgischen und ophthalmologischen Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Containern und Laborutensilien. Zur Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen.

Anwendungshinweise

Dosierung:

Standardempfehlung: 0,5 % (5 ml/l).

Je nach Verschmutzungsgrad 0,3 - 1 % (3 - 10 ml/l) möglich.

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.

Für die Reinigung und die nachfolgenden Programmschritte wird empfohlen, mindestens enthärtetes, bevorzugt vollentsalztes Wasser einzusetzen. Ein pH-Wert > 10 wird durch die Verwendung einer geeigneten Wasserqualität mit der dafür entsprechenden Dosierung gesichert.

Eine Neutralisation mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP sichert ein optimales Aufbereitungsergebnis. Unter Verwendung von geeigneter Wasserqualität ist eine Neutralisation nicht zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.





thermosept® alka clean forte

Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % NTA und deren Salze, < 5 % Polycarboxylate, Enzyme.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte ca. 1,1 g/cm3 / 20 °C / 1.013 hPa

Farbe fast farblos

Flammpunkt > 70 °C / Methode : DIN 51755 Part 1

Form flüssig

pH 12 - 12,8 / 20 °C / Konzentrat Viskosität, dynamisch ca. 3 mPa*s / Methode : ISO 3219

Besondere Hinweise

Konzentrat und Gebrauchslösung nicht mit Säuren abmischen. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Im Originalgebinde lagern.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	ArtNr.
thermosept alka clean forte 5 kg KA	1/Kanister	147301
thermosept alka clean forte 10 kg KA	1/Kanister	147302
thermosept alka clean forte 30 kg KA	1/Kanister	147303
thermosept alka clean forte 20 I KA	1/Kanister	147308
thermosept alka clean forte 200 kg FA	1/Fass	147304

Zubehör

Zubehör	ArtNr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Verwandte Produkte

- thermosept® NKP
- thermosept® NKZ

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Care Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com







Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.