Wewa® Med Knieschiene

Die Knieschiene dient, je nach Ausführung, zur Lagerung und Immobilisierung des Kniegelenks in gerader bzw. gebeugter Stellung.

Das hautfreundliche Frotteematerial auf der Innenseite sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Durch die dreiteilige Konstruktion und die Anpassbarkeit der herausnehmbaren Stabilisierungselemente ist die Schiene universell einsetzbar und nahezu für jedes Bein geeignet. Sie kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

Indikation

Postoperativ oder posttraumatisch zur Ruhigstellung des Kniegelenks

Nicht anwenden wenn das Tragen zu einem Schmerzgefühl führt.

Anlegehinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Alle Klettbänder öffnen und die Schiene von hinten an das Bein legen
- Sie ist dann korrekt positioniert, wenn die Verschlusslasche über den drei Stabilisierungselementen auf der Rückseite nach oben zeigt
- Die Stabilisierungselemente sind vorgeformt, können jedoch bei Bedarf individuell und ausschließlich von orthopädischen Fachkräften angepasst werden.
 Überprüfen Sie, ob die Schiene komfortabel um das Bein passt. Bei Bedarf die beiden Seitenteile neu positionieren und den Umfang korrigieren
- Bei Bedarf kann die Schiene mit den beiden unelastischen Klettbändern am Bein fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Kniescheibe in der dafür vorgesehenen Öffnung positioniert wird
- Die Klettbänder nach der untenstehenden Reihenfolge verschließen
- Den Sitz der Schiene überprüfen und ggf. die Gurte nachjustieren
- Darauf achten, dass die Schiene die Blutzirkulation nicht beeinträchtigt. Eventuell müssen die Bänder etwas gelockert werden, um Stauungen zu vermeiden
- Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft















Materialien

Polyamid, Polyester, PU-Schaum, Aluminium

Pflege- und Waschhinweise

- Siehe Wäscheetikett
- Vor dem Waschen Stäbe aus den Taschen entfernen und Klettverschlüsse schließen
- Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen
- Die Stäbe erst einlegen, wenn die Knieschiene vollständig getrocknet ist

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Immobilisierungsschiene 20°		
Art./REF	Länge	Körpergröße
60004	40 cm	< 1,40 m
60005	50 cm	> 1,40 m
60032	55 cm	> 1,55 m
60006	60 cm	> 1,70 m

HMV POS.-NR. 23.04.01.1028

