

Gebrauchsanweisung

WewaCross

WewaCross ist eine pflegeleichte und atmungsaktive elastische Orthese mit hohem Tragekomfort. Die ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit erhält die Orthese durch gekreuzte Stützbänder im Rückenteil sowie den Doppelzug am Leibteil. Die Orthese ist am Leibteil durch Klette verschließbar. Das eingearbeitete Flauschband auf der Rückeninnenseite dient dem Einsetzen einer Pelotte. Vier flexible Stäbe verstärken zusätzlich die Unterstützung im Rückenteil.

Indikationen

- Iliosakrale Gelenk-Irritationen
- Facettensyndrom (Mehrbelastung der Wirbelgelenke)
- Chronische, nicht spezifische Schmerzen im lumbosakralen Bereich
- Bei rückenbeanspruchenden Tätigkeiten (sekundäre Prävention)
- Degenerative Funktionsstörung der lumbalen Wirbelsäule
- Ligamentosen
- Postoperative Behandlung
- Lumbalgien (Rückenschmerzen)
- Reizzustände der kleinen Zwischengelenke
- Bei Rücken- und Kreuzschmerzen

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßkrankungen, allergischen Hautreaktionen und -reizungen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten, wie Unproportionalität, Fettleibigkeit etc. (Sonderanfertigung möglich). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Materialien

- Baumwolle, Polyester, Polyamid, Elasthan

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen!
- Keinen Weichspüler benutzen



Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Werkmeister GmbH + Co. KG 

Eschweger Straße 10 • D-37281 Wanfried

Fon +49 (0) 5655 9899-0

info@werkmeister-gmbh.de

Fax +49 (0) 5655 9899-22

www.werkmeister-gmbh.de

QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

19.04.12



Art. Nr.	Größe	Umfang	Leibhöhe	Rücken- höhe
5125	S	70 - 80 cm	17 - 19 cm	23 cm
5125	M	81 - 95 cm	17 - 19 cm	23 cm
5125	L	96 - 110 cm	17 - 19 cm	23 cm
5125	XL	111 - 125 cm	17 - 19 cm	23 cm
5125	XXL	126 - 140 cm	17 - 19 cm	23 cm



Für Damen/Herren:
Maß Taillenumfang

Werkmeister[®]