

WHITECROSS


Kreativagentur für Medical Marketing

Client **HARTMANN**
Title Molicare® Bed Mat textile

Length **ca. 4 min**
Date **15.11.19**
Page **1**

VIDEO

Text erscheint

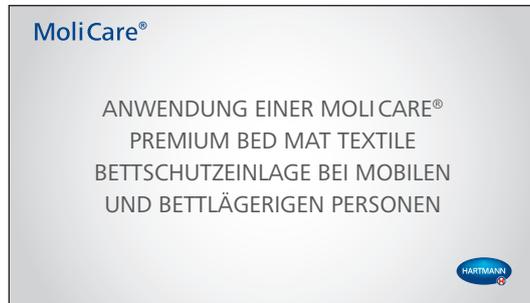

Frame 01

Text erscheint



Frame 02

Hände falten bed mat auf




Frame 03

Symbole erscheinen



Frame 04

Bett erscheint.
Danach erscheint Lupe und die Ecke der bed mat legt sich auf die Matratze

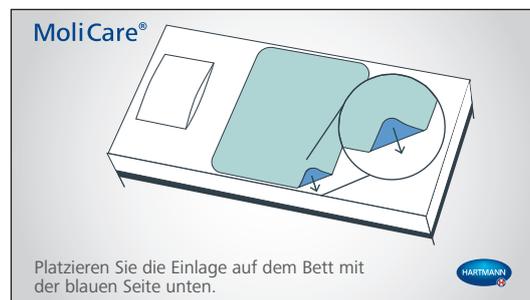

Frame 05

AUDIO

Anwendung einer MoliCare® Premium Bed Mat Textile Bettschutzeinlage bei mobilen und bettlägerigen Personen

Anwendung bei mobilen Personen

Falten Sie die Bettschutzeinlage vollständig auseinander.

Vor der Verwendung sollten Sie die Einlage gemäß der Waschanleitung waschen und trocknen.

Die Bed Mat kann bis zu 250 Mal gewaschen werden.

Platzieren Sie die Einlage auf dem Bett mit der blauen Seite nach unten.

WHITECROSS


Kreativagentur für Medical Marketing

Client **HARTMANN**
Title Molicare® Bed Mat textile

Length **ca. 4 min**
Date **15.11.19**
Page **2**


VIDEO

Betten erscheinen nacheinander und werden abgehakt

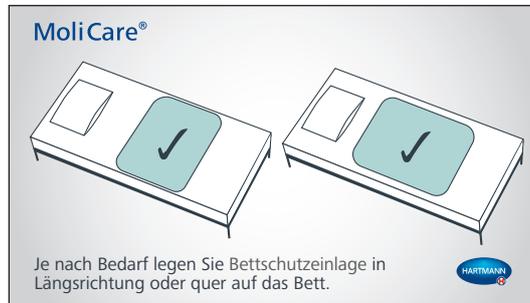


Frame 06

Bett erscheint.
Bed mat legt sich übers Bett

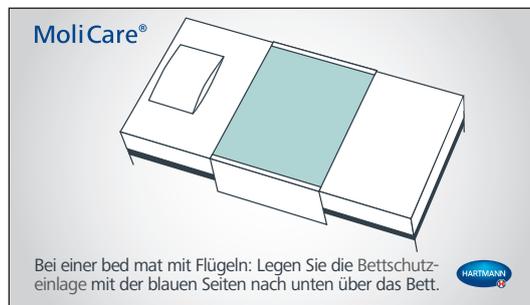

Frame 07

Hände schieben die Flügel unter die Matratze

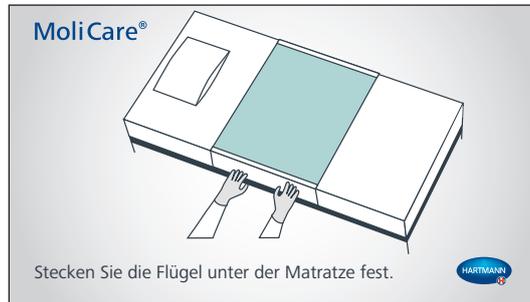

Frame 08

Hände rollen die bed mat zusammen



Frame 09

Symbole erscheinen



Frame 10

AUDIO

Je nach Bedarf legen Sie die Bettschutzeinlage in Längsrichtung oder quer auf das Bett.

Bei Nutzung einer Molicare® Bed Mat mit Flügeln: Legen Sie die Bettschutzeinlage mit der blauen Seite nach unten über das Bett.

Stecken Sie die Flügel auf beiden Seiten unter der Matratze fest, um die Bettschutzeinlage zu sichern.

Um sie zu entfernen, rollen Sie die Bettschutzeinlage nach innen.

Bei Verwendung einer Bettschutzeinlage mit Flügeln lösen Sie die Flügel, klappen diese nach innen, rollen Sie die Einlage zusammen und entfernen Sie diese.

Vor der erneuten Nutzung waschen und trocknen Sie die Einlage gemäß der Waschanleitung.

WHITECROSS

Kreativagentur für Medical Marketing

Client **HARTMANN**
Title Molicare® Bed Mat textile

Length **ca. 4 min**
Date **15.11.19**
Page **3**

VIDEO

Text erscheint



Frame 11

Hände falten bed mat auf



Frame 12

Symbole erscheinen



Frame 13

Hände drehen Körper in die Seitenlage



Frame 14

Hände rollen die bed mat zum Körper



Frame 15

AUDIO

Rückenschonende Anwendung bei bettlägerigen Personen

Falten Sie die Bettschutzeinlage vollständig auseinander.

Vor der Verwendung sollten Sie die Einlage gemäß der Waschanleitung waschen und trocknen.

Die textile Bettschutzeinlage kann bis zu 250 Mal gewaschen werden.

Person vorsichtig in die stabile Seitenlage bringen.

Die Bettschutzeinlage mit der blauen Seite zur Matratze zu einem Drittel einrollen und mit der gerollten Seite parallel zum Gesäß legen.

WHITECROSS

Kreativagentur für Medical Marketing

Client **HARTMANN**
Title Molicare® Bed Mat textile

Length **ca. 4 min**
Date **15.11.19**
Page **4**

VIDEO

Hände drehen Körper auf die andere Seite.
Hände rollen den Rest der bed mat aus



Frame 16

Hände drehen Körper in Rückenlage



Frame 17

Hände drehen Körper in Seitenlage.
Hände rollen die bed mat zum Körper



Frame 18

Neue bed mat wird zum Körper hin entrollt



Frame 19

Körper wird von den Händen auf die andere Seite gedreht.
Gebrauchte bed mat wird von den Händen zusammengerollt



Frame 20

AUDIO

Drehen Sie die Person über den Rücken auf die andere Seite und rollen Sie das verbliebene Drittel der Bettschutzeinlage auseinander.

Drehen Sie die Person zurück auf den Rücken.

Zum Entfernen der Bettschutzeinlage drehen Sie die Person vorsichtig in die stabile Seitenlage. Rollen Sie die benutzte Einlage zur Mitte des Bettes zusammen, bis zum Rücken der Person.

Legen Sie die neue Bettschutzeinlage gespiegelt – also mit der aufgerollten Seite zur Person – neben die gebrauchte Einlage.

Drehen Sie die Person über den Rücken auf die andere Seite. Entfernen Sie die gebrauchte Bettschutzeinlage, indem Sie sie weiter nach innen zusammenrollen.

WHITECROSS

Kreativagentur für Medical Marketing

Client **HARTMANN**
Title Molicare® Bed Mat textile

Length **ca. 4 min**
Date **15.11.19**
Page **5**

VIDEO

Erste Hand oben erscheint und entrollt den Rest der bed mat.
Hand oben verschwindet.
Zweite Hand erscheint und dreht den Körper in Rückenlage



Frame 21

Symbole erscheinen



Frame 22

Produkt erscheint



Frame 23

AUDIO

Rollen Sie die neue Bettschutzeinlage auseinander und drehen Sie die Person auf den Rücken.

Vor der erneuten Nutzung waschen und trocknen Sie die Einlage gemäß der Waschanleitung.

MoliCare® Premium Bed Mat waschbare textile Bettschutzeinlagen sind in verschiedenen Größen für mobile und bettlägerige Personen erhältlich.